

Wurmkontrolle bei Legehennen Anleitung zum Einsammeln und Verschicken der Hühnerkotproben

Sehr geehrte Hühnerhalterin
Sehr geehrter Hühnerhalter

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. **Anfang Woche** frischen Kot aus dem Stall zufällig auswählen und in einem Gefäss sammeln.
2. Den Kot gründlich mischen und mit dem vom FiBL-Labor zugesandten Handschuh eine Handvoll (zirka 100 g) greifen.
3. Den Handschuh umstülpen und in einen dichten Plastikbeutel einpacken. Diesen wiederum in einen zweiten Plastikbeutel packen.
4. Name und Ort mit einem wasserfesten Stift auf den Plastikbeutel schreiben.
5. Die dreifach verpackte Kotprobe und das ausgefüllte Untersuchungsformular in das erhaltene Versandkuvert legen.
6. Die Mischprobe noch am gleichen Tag mit A-Post an das Labor schicken.

Um ein gutes Analyseresultat zu erhalten, ist es wichtig, die oben stehenden Punkte einzuhalten.

Vielen Dank!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Erika Perler
Labor Nutztierwissenschaften
Tel. +41 62 865 72 26