

Instructions pour le prélèvement et l'envoi de crottins Vermifugation sélective, chevaux

Chèr*e propriétaire de chevaux

Pour que nous puissions vous fournir des résultats d'analyse fiables, nous vous prions de prêter attention aux points suivants lors de la collecte et de l'envoi des échantillons de crottins:

1. Collecter le(s) échantillon(s) de crottins en **début de semaine**.
2. Collecter, si possible, les crottins fraîchement déposés sur la moitié supérieure du tas, sans contact avec le sol. Il faut environ deux boules de crottins par échantillon ou par animal.
3. Ramasser les crottins avec le gant fourni, retourner le gant et le nouer.
4. Placer le gant avec l'échantillon de crottins dans le sac en plastique joint et le fermer hermétiquement. Inscrire sur l'échantillon la date, le nom du cheval et votre nom à l'aide d'une étiquette adhésive.
5. Placer le sac en plastique étiqueté avec l'échantillon de crottins dans l'enveloppe d'expédition pré-adressée jointe. L'échantillon est maintenant triplement emballé.
6. Envoyer le(s) échantillon(s) le jour même par courrier A au laboratoire.

Merci beaucoup!

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Sandra Cvejic
Labor Nutztierwissenschaften
Tél. +41 (0)62 865 72 26